

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МДК Медика»

_____ Е.Ю. Татаревич
« _____ » _____ 2019 г.

Инструкция по применению
медицинского изделия
«Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСПАС М», стерильное»

2019 г.

Назначение

Медицинское изделие «Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСПАС М» стерильное» (далее по тексту «ГЕМОСПАС М») предназначено для остановки массивных кровотечений смешанного генеза, а также капиллярных и других видов кровотечений при оказании первой помощи, скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи. В условиях стационара может применяться для остановки кровотечения, связанного с повреждением сосудов, в том числе из паренхиматозных органов. «ГЕМОСПАС М» может использоваться в амбулаторно-поликлиническом звене и в домашних условиях.

Техническая характеристика

«ГЕМОСПАС М» представляет собой материал на основе крупнозернистого порошка гидросиликата кальция, обладающего адсорбирующей способностью. Гемостатический эффект основан на способности гранул порошка поглощать большой объем воды. В результате реализуется гигроскопический механизм гемостаза, приводящий к связыванию воды и низкомолекулярных веществ в области дефекта сосудов и локальной концентрации клеточных и крупных белковых компонентов крови (в т.ч. факторов свертывания). Это в свою очередь индуцирует формирование кровяного свертка. Эффект гемостаза усиливается за счет высокого содержания кальция в препарате, который является кофактором во многих звеньях коагуляционного каскада, а также за счет поверхностного потенциала кристаллов гидросиликата кальция, способствующего активации XII фактора свертываемости крови и тромбоцитов.

При использовании изделие легко заполняет полость раны, не фиксируется к тканям, не всасывается, после применения легко удаляется механическим путем.

В условиях эксплуатации «ГЕМОСПАС М» нетоксичен и не вызывает местнораздражающих или аллергических эффектов при контакте с раневой поверхностью и неповрежденной кожей.

Вид исполнения

«ГЕМОСПАС М» выпускается в индивидуальных упаковках из материала упаковочного комбинированного, расфасованный по 2, 5, 10, 50, 75 и 100 г.

Порядок применения

Перед применением «ГЕМОСПАС М» рекомендуется очистить рану от инородных тел, кровяных свертков для обеспечения максимального контакта «ГЕМОСПАС М» с поврежденным сосудом. При повреждении артерий перед использованием «ГЕМОСПАС М» целесообразно выполнить временную остановку кровотечения пальцевым прижатием поврежденной артерии или наложением кровоостанавливающего жгута во избежание вымывания препарата из раны струей крови.

«ГЕМОСПАС М» применяется путем засыпания порошка в рану непосредственно к источнику кровотечения. После заполнения полости раны поверх «ГЕМОСПАС М» необходимо наложить ватно-марлевый тампон или бинт, сложенный в несколько слоев, и осуществить ручную компрессию в течение 3-5 мин. После этого в случае остановки кровотечения тампон необходимо зафиксировать турами бинта (накладывается давящая повязка).

При неэффективном гемостазе показано повторное засыпание «ГЕМОСПАС М» и компрессия в течение 5-7 мин. Засыпание «ГЕМОСПАС М» осуществляется из следующей упаковки. Если после этого кровотечение продолжается, необходимо выполнить наложение кровоостанавливающего жгута.

Поврежденную конечность целесообразно иммобилизовать для снижения риска повторного кровотечения.

Упаковку «ГЕМОСПАС М» необходимо вскрывать непосредственно перед применением, «ГЕМОСПАС М» повторному использованию не подлежит. При нарушении герметичности упаковки для использования не пригоден из-за быстрого влагонасыщения. Повторная стерилизация невозможна.

Меры предосторожности

Применять только после ознакомления с инструкцией.

Противопоказания

«ГЕМОСПАС М» противопоказаний к применению не имеет.

Условия хранения

«ГЕМОСПАС М» хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре не выше 40 С.

Срок годности – 3 года с даты изготовления.

Утилизация

Образующиеся отходы и отработанное изделие складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Производитель/организация принимающая претензии

Общество с ограниченной ответственностью «МДК Медика»

Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.36, пом. IX, офис 1

Тел./факс: +7 (495) 151-82-91

E-mail: info@mdk-medica.ru